



JES-EXTENDER - PER L'INGRANDIMENTO DEL PENE NERO

Si tratta di un dispositivo con certificazione medica che serve per allungare il pene tramite trazione.

Come funziona JES-EXTENDER?

JES-EXTENDER è facile da applicare, non provoca dolore e non è rilevabile sotto i pantaloni larghi. Il JES-EXTENDER aumenta sia la lunghezza che la circonferenza del pene. È l'unico metodo provato e documentato per l'ingrandimento del pene senza intervento chirurgico o consultazione medica.

L39;inizio

JES-EXTENDER utilizza la trazione per guidare la naturale capacità del corpo umano di cambiare e svilupparsi sotto l'influenza fisica. Se esponi una certa parte del tuo corpo a uno stiramento costante, le cellule in quest'area iniziano a dividersi e moltiplicarsi, aumentando così la massa dei tessuti. Di conseguenza, l'allungamento avviene sia in lunghezza che in larghezza (spessore) del pene. Diverse e numerose culture conoscono e hanno utilizzato nei secoli questo principio naturale per sviluppare o allungare varie parti del corpo.

dispositivo medico

Un anello di plastica appositamente progettato viene posizionato attorno alla base del pene. Una clip in plastica e silicone si adatta alla testa del pene. Tra l'anello e la chiusura, due barre metalliche dinamiche applicano una tensione compresa tra 600 e 1.500 grammi. L'utente regola la tensione. Il JES-EXTENDER si adatta a tutte le persone e a peni di qualsiasi dimensione.

Come funziona in pratica?



Il JES-EXTENDER può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata per periodi prolungati, al lavoro o nel tempo libero, a seconda delle attività svolte. Il numero totale di ore di utilizzo del JES-EXTENDER e la trazione applicata determinano il risultato del trattamento. Non è necessario utilizzare JES-EXTENDER per un periodo lungo e ininterrotto per ottenere risultati. Esempio: un trattamento di 2 ore al giorno per 12 mesi darà lo stesso risultato finale di un trattamento di 12 ore al giorno per 2 mesi. Puoi anche smettere di usarlo per un po'; senza compromettere il risultato finale. Ciò non significa che "perderai" parte dei risultati ottenuti.

Può essere utilizzato anche di notte, anche se potrebbe staccarsi se ci si muove durante il sonno o durante un'erezione notturna. Si consiglia di utilizzare il cuscinetto protettivo o qualsiasi altra misura protettiva per l'uso notturno del JES-EXTENDER. Dopo un po'; di pratica, l'applicazione del JES-EXTENDER richiederà meno di un minuto. Il trattamento con JES-EXTENDER non ha effetti collaterali, non influisce sulla minzione, sull'erezione o sulla fertilità e l'allungamento è permanente. Non hai bisogno dell'aiuto del tuo medico.

Nel campo della chirurgia lo stesso principio è stato applicato per allungare le dita o le gambe e per coprire i difetti del viso.

Risultati permanenti da 3 a 5 centimetri.

Garanzia medica, poiché il suo utilizzo è approvato dalle Autorità Sanitarie dell'Unione Europea ed è registrato presso il Ministero della Salute spagnolo. Ha la certificazione CE di tipo 1, che garantisce che non ha effetti collaterali, né a breve né a lungo termine.

- Efficacia 97%

Garanzia scientifica, poiché prestigiosi urologi di tutto il mondo hanno effettuato studi scientifici che dimostrano un'efficacia di JES-EXTENDER del 97,5%.

Peso del dispositivo: 195 gr.

*Video illustrativo, Jes extender può apportare modifiche tecniche che non si riflettono nel video.