



CONFORTEX - PRESERVATIVI NATURE FORTE 144 UNITÀ

I preservativi **CONFORTEX NATURE** sono realizzati con sostanze di prima qualità. Sono dispositivi medici approvati e marcati CE0120.

Tutti i nostri preservativi sono conformi ai requisiti della Direttiva del Consiglio 93/42 / CEE sui dispositivi medici e sono testati in conformità alla EN ISO 4074 che specifica i requisiti applicabili ai preservativi di gomma monouso, nonché le loro caratteristiche e metodi di prova.

I metodi di prova applicati a tutti i preservativi **CONFORTEX NATURE** che ne garantiscono la qualità e la sicurezza, vanno ben oltre i requisiti applicabili degli standard internazionali. Ecco perché il 100% dei nostri profilattici è testato elettronicamente e rigorosamente microbiologico.

Il loro design distintivo e la sua audace combinazione di colori rendono i preservativi **CONFORTEX NATURE** un prodotto facile da identificare con cui vivrai un sesso più divertente e sicuro.

La confezione unitaria dei preservativi **CONFORTEX NATURE**, comprende le istruzioni e le indicazioni per l39;uso e la conservazione, nonché tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro.

I preservativi **CONFORTEX NATURE** hanno una data di scadenza di 5 anni dalla data di produzione. Tutti i nostri pacchetti hanno impresso sia la data di scadenza che il numero di lotto per l39;identificazione. La data di scadenza indica il periodo di utilizzo con risultati ottimali.

Apri l39;involucro del preservativo dal lato seghettato. Evita di danneggiarlo con i bordi dell39;involucro, le unghie,
i gioielli o i denti. Una volta aperto e prima di posizionarlo, controlla se il preservativo è a destra o capovolto
(questo può essere fatto soffiando un po 39;all39;interno del preservativo per vedere in che modo dobbiamo
srotolarlo).



- Posizionare il preservativo sul pene eretto prima di qualsiasi penetrazione vaginale o orale. Premere l39;estremità
 del preservativo per espellere l39;aria e lasciare spazio allo sperma. Srotola il preservativo per coprire
 completamente il pene. I nostri preservativi sono dotati di lubrificante aggiunto, ma se non è sufficiente, puoi
 utilizzare CONFORTEX GEL NATURE lubrificante a base d39;acqua per facilitare la penetrazione ed è
 compatibile con i preservativi
- Dopo l39; eiaculazione, e mentre il pene è ancora eretto, rimuovere il preservativo tenendo saldamente la sua base per evitare che lo sperma fuoriesca.
- Verifica che il preservativo non sia stato rotto (riempiendo d39;acqua e pressando il serbatoio), legalo e gettalo nella pattumiera, mai nel cesso o per strada (considera che i preservativi non sono biodegradabili). Usa un nuovo preservativo per ogni rapporto o pratica sessuale modificata.

MARCHIO COMMERCIALE: CONFORTEX

• 144 unità