



PASANTE - PRESERVATIVO GAMMA REGOLARE 3 UNIT

I preservativi Pasante Regular hanno una forma leggermente affusolata per una sensazione naturale. Morbido, di colore naturale e con tettarella in punta.

- Contiene 3 preservativi
- Non lubrificato con spermicida
- Marcatura CE
- Non contiene ingredienti di origine animale.
- Senza alcol
- Lunghezza nominale 190 mm
- Larghezza nominale 54 mm

Modo corretto di indossare e togliere il preservativo maschile

Apri e rimuovi con attenzione il preservativo dal suo involucro. Posiziona il preservativo sulla testa del pene eretto e sodo.

Se sei circonciso, ritrai prima il prepuzio. Espellere l'aria che si trova nella punta del preservativo