



PASANTE - PRESERVATIVI MS CON TRIM SOTTILE 12 UNIT

I preservativi Pasante Trim offrono una larghezza più stretta per una vestibilità più piccola. Colore parallelo, liscio e naturale.

- Contiene 12 preservativi
- Non lubrificato con spermicida
- Segnato da un aquilone
- Marcatura CE
- Non contiene ingredienti di origine animale.
- Senza alcol
- Lunghezza nominale 180 mm
- Larghezza nominale 49 mm

Modo corretto di indossare e togliere il preservativo maschile

Apri e rimuovi con attenzione il preservativo dal suo involucro. Posiziona il preservativo sulla testa del pene eretto e sodo. Se sei circonciso, ritrai prima il prepuzio. Espellere l'aria che si trova nella punta del preservativo