



## PASANTE - SETA MS FINE 12 UNIT

Seta sottile? è il preservativo in lattice più sottile di Pasante ed è fino alla metà dello spessore di un normale preservativo Pasante \*. Con uno spessore di soli 40-45 micron, Silk Thin? offre a entrambi i partner l'esperienza sessuale più vicina a quella sensazione reale. Preservativi lisci, paralleli, di colore naturale. Silk Thin è lungo 190 mm e largo 53 mm.

\*prendendo lo spessore più sottile di Pasante Silk Thin ? (40 micron) e lo spessore più grosso del Pasante Regular (80 micron)

- Contiene 12 preservativi
- Non lubrificato con spermicida
- Marcatura CE
- Non contiene ingredienti di origine animale.
- Senza alcol
- Sottile fino a 0,04 mm

Modo corretto di indossare e togliere il preservativo maschile

Apri e rimuovi con attenzione il preservativo dal suo involucro. Posiziona il preservativo sulla testa del pene eretto e sodo. Se sei circonciso, ritrai prima il prepuzio. Espellere l'aria che si trova nella punta del preservativo