



PASANTE - IL BUIO 12 UNIT

I preservativi Pasante Glow si illuminano al buio dopo essere stati esposti alla luce. Liscio.

- Contiene 12 preservativi
- Non lubrificato con spermicida
- Marcatura CE
- Non contiene ingredienti di origine animale.
- Senza alcol
- Lunghezza nominale 190 mm
- Larghezza nominale 53 mm

Modo corretto di indossare e togliere il preservativo maschile

Apri e rimuovi con attenzione il preservativo dal suo involucro. Posiziona il preservativo sulla testa del pene eretto e sodo. Se sei circonciso, ritrai prima il prepuzio. Espellere l'aria che si trova nella punta del preservativo