



## NINA KIKÍ - COPPA MESTRUALE VIOLA - TAGLIA L

NINA CUP è la tua coppetta mestruale. Innovativa, comoda ed ecologica, NINA è la soluzione ideale per la tua igiene intima. Realizzato in Sillicon di grado medicale al 100%, la sua tolleranza è ottimale, consentendo un uso prolungato fino a 12 ore.

NINA CUP, conosciuta anche come coppetta vaginale o coppetta in silicone, è un sostituto ecologico degli attuali metodi



di igiene femminile come tamponi e assorbenti.

Il meccanismo della coppetta mestruale è semplice. È una coppetta di silicone o lattice che viene inserita nella vagina durante le mestruazioni. Al contrario degli assorbenti e degli impacchi, la coppetta mestruale non assorbe il flusso, lo trattiene all'interno quindi possiamo rimuoverlo ogni volta che ne abbiamo bisogno.

Come usare NINACUP?

- Far bollire 3 minuti per sterilizzarlo.



- Rilassati se è la prima volta.
- Pulisci le tue mani
- Mettiti in una posizione comoda.
- Premi la tazza.
- Piegalo a forma di U
- Separa le labbra con l'altra mano e inserisci la tazza come nell'immagine.

Come rimuovere?

- Pulisci le tue mani.
- Mettiti in una posizione comoda.
- Inserire due dita e tirare dalla maniglia, rimuovendola lentamente.
- Pulisci la tazza con acqua e sapone a ph neutro (senza profumo)
- Pronto per essere utilizzato di nuovo.

NINA CUP sono riutilizzabili, quindi sono ecologiche e risparmierai soldi perché non dovrai comprare assorbenti o assorbenti ogni volta che hai le mestruazioni

Taglia L

Le misure:

- Diametro: 40ml
- Capacità 15ml