



FEMINTIMATE - EVE NUOVA COPPE MESTRUALI IN SILICONE - TAGLIA M

Eve cup la tua coppetta mestruale è innovativa, comoda ed ecologica. La soluzione ideale per la tua igiene intima. Realizzato in silicone platino al 100%, la sua tolleranza è ottimale, consentendo un uso prolungato fino a 12 ore.

PERCHÉ VE CUP?

Non provoca allergie, infezioni fungine o uretriti. Non altera negativamente l'ambiente naturale della vagina. Ideale per praticare sport. Comodo di giorno, di notte o in viaggio.

COME METTERE LA MIA ÉVE CUP?

Prima del primo utilizzo si consiglia di sterilizzarlo facendolo bollire in acqua per qualche minuto o in apposita soluzione sterilizzante. Posizionarlo sempre con le mani pulite. Ti consigliamo di inserire la tua Eve Cup mentre sei seduto, accovacciato, in ginocchio o in piedi. Scegli la posizione per te più comoda e per facilitarne l'inserimento bagnalo con acqua o utilizza un lubrificante a base d'acqua e segui i passaggi successivi. Comprimere la coppetta in mano, piegarla a metà nel senso della lunghezza, inserirla obliquamente verso il fondo, lasciandola incastrata nella cavità vaginale.

COME OTTENERE LA MIA VE CUP?

Con le mani pulite e nella posizione più comoda e rilassata, contrarre i muscoli vaginali per chiudere la coppetta fino all'ingresso della vagina. Con l'aiuto di un dito, controlla che i bordi della coppetta siano ben separati dalla parete vaginale. Comprimere la parte inferiore rilasciando la pressione fino a rimuoverla e versarne il contenuto nel wc. Lavare il bicchiere con acqua calda e sapone a pH neutro, riporlo nella sua busta inclusa

COME POSSO UTILIZZARE LA MIA VE CUP?



Rimuovere e svuotare la tazza ogni 12 ore al massimo. Il polsino della coppa **Eve** può essere tagliato per adattarlo alla lunghezza. Permette un utilizzo prolungato fino a 12 ore senza svuotarlo.

TAGLIA M:

- Diametro interno: 4,6 cm
- Altezza della tazza: 6,8 cm
- Capacità: 17ml

CARATTERISTICHE:

- Silicone platino al 100%.
- Durata estesa fino a 12 ore
- Ipoallergenico
- Nessuna irritazione
- Ecologico
- Applicazione semplice