



BATHMATE - DOCCIA ANALE IDRODOUCHE

Bathmate Hydrouche offre la soluzione più innovativa per tutti quegli uomini che desiderano una dimensione del pene più grande.

Grazie all'enorme potenziale della forza idraulica, Bathmate può esercitare una potenza di aspirazione maggiore rispetto ai suoi concorrenti, forzando l'espansione dei corpi cavernosi e aumentando le dimensioni del pene in un tempo minimo.

Con Bathmate puoi ottenere un aumento di dimensioni in modo discreto e tranquillo nell'intimità della tua vasca da bagno o della tua doccia.

Prodotto con i migliori materiali e con la massima qualità per soddisfare le vostre esigenze. Utilizzando Bathmate possiamo ottenere la lunghezza e lo spessore extra che abbiamo sempre desiderato.

Come viene utilizzato?

- 1) Riempire la vasca con acqua.
- 2) Una volta nella vasca da bagno, posizionare il Bathmate sott'acqua finché non si riempie completamente. Il pene viene quindi introdotto all'interno e poggia sulla base del bacino.
- 3) Spingi ripetutamente il Bathmate verso di te. Questo aziona il meccanismo di contrazione idraulica della base della pompa, creando l'effetto del vuoto. Inizierai a sentire che la pressione aumenta. Man mano che l'acqua viene evacuata dall'interno attraverso la valvola superiore, il pene si espande sempre di più.
- 4) Quando non riesci più a pompare, riposa semplicemente per cinque minuti. Il vuoto ottimale avviene quando non è più



possibile espellere più acqua dall'interno del Bathmate.

5) Ripetere l'operazione di pompaggio ogni quattro o cinque minuti, riposarsi e ripetere la manovra. È necessario ripetere questa operazione in quanto in ogni ciclo di compressione c'è un momento in cui non è più possibile estrarre acqua.

6) Ripetere l'operazione di pompaggio ogni quattro o cinque minuti, riposarsi e ripetere la manovra. È necessario ripetere questa operazione in quanto in ogni ciclo di compressione c'è un momento in cui non è più possibile estrarre acqua.

7) Se ritieni che la pressione sia troppo forte, rilascia leggermente la valvola superiore. Ricordatevi di farlo in acqua per evitare che entri aria. Dopo 15-20 minuti di utilizzo, ridurre la pressione premendo il pulsante di rilascio sulla parte superiore del Bathmate. Quindi alzati e vedi i risultati immediati. Non rimarrai deluso!

8) Si consiglia di utilizzare da 15 a 20 minuti per sessione, tre volte a settimana per ottenere i migliori risultati.