



## BATHMATE - HYDROMAX 9 AUMENTO DEL PENE BLU

L39;estensore definitivo del pene. Bathmate Hydromax 9 (X40), ora più grande del 15% rispetto a Hydromax Hercules, offre la soluzione più innovativa per tutti quegli uomini che desiderano una dimensione del pene più grande.

Grazie all39;enorme potenziale della forza idraulica, Bathmate può esercitare una potenza di aspirazione maggiore rispetto ai suoi concorrenti, forzando l39;espansione dei corpi cavernosi e aumentando le dimensioni del pene in un tempo minimo.

Con Bathmate puoi ottenere un aumento di dimensioni in modo discreto e tranquillo nell39;intimità della tua vasca da bagno o della tua doccia.

- Fino a 7 cm di lunghezza.
- Fino al 30% più spesso.
- Fino al 40% di volume in più.

Migliaia di uomini che hanno già apprezzato Bathmate sono rimasti piacevolmente sorpresi dai rapidi risultati ottenuti. Utilizzando Bathmate possiamo ottenere la lunghezza e lo spessore extra che abbiamo sempre desiderato.

Forse non sapevi che potresti aumentare significativamente le dimensioni del tuo pene, nel comfort e nella privacy del tuo bagno, con risultati sorprendenti, in soli 15-20 minuti al giorno per 6 settimane.

Con Bathmate otterrai un pene molto più spesso, più lungo e più sano, ottenendo guadagni permanenti, che potrai goderti per sempre! Molti uomini stanno utilizzando questo dispositivo proprio adesso, seduti nella vasca da bagno o nella



doccia... ottenendo risultati immediati, efficaci e in rapido progresso solo con Bathmate

Come viene utilizzato?

1. Riempi la vasca con acqua.
2. Una volta nella vasca, fai scorrere il Bathmate sott'acqua finché non si riempie completamente. Il pene viene quindi introdotto all'interno e poggia sulla base del bacino.
3. Spingi ripetutamente il Bathmate verso di te. Questo aziona il meccanismo di contrazione idraulica della base della pompa, creando l'effetto del vuoto. Inizierai a sentire che la pressione aumenta. Man mano che l'acqua viene evacuata dall'interno attraverso la valvola superiore, il pene si espande sempre di più.
4. Quando non riesci più a pompare, riposa semplicemente per cinque minuti. Il vuoto ottimale avviene quando non è più possibile espellere più acqua dall'interno del Bathmate.
5. Ripetere l'operazione di pompaggio ogni quattro o cinque minuti, riposarsi e ripetere la manovra. È necessario ripetere questa operazione in quanto in ogni ciclo di compressione c'è un momento in cui non è più possibile estrarre acqua.
6. Se ritieni che la pressione sia troppo forte, rilascia leggermente la valvola superiore. Ricordatevi di farlo in acqua per evitare che entri aria. Dopo 15-20 minuti di utilizzo, ridurre la pressione premendo il pulsante di rilascio sulla parte superiore del Bathmate. Quindi alzati e vedi i risultati immediati. Non rimarrete delusi!
7. Si consiglia di utilizzare da 15 a 20 minuti per sessione, tre volte a settimana per ottenere i migliori risultati.