

LELO - SET LUNA BEADS PLUS PIACERE



Per le donne che desiderano migliorare le proprie sensazioni e relazioni intime e raggiungere orgasmi più lunghi e intensi, LELO Beads™ Plus è tutto ciò che stavi cercando. E LELO Beads™ Plus è un lussuoso set di 6 sfere con pesi che offrono il 44% in più di combinazioni per tonificare il pavimento pelvico. Completamente sommergibili e sicuri per il corpo, sono perfetti per eseguire esercizi di Kegel e ravvivare i tuoi incontri romantici.

IL MODO PER RAGGIUNGERE ORGASMI PIÙ LUNGHI E INTENSI

Metti alla prova il tuo pavimento pelvico con questo lussuoso set di 6 palline con pesi intercambiabili. Con una maggiore varietà di combinazioni per le tue routine Kegel, LELO Beads™ Plus vibrano delicatamente quando ti muovi, aiutandoti a raggiungere gradualmente orgasmi più intensi. Tonifica e divertiti con le migliori palline vaginali sul mercato: LELO Beads™ Plus sono qui

PERCHÉ I TUOI CLIENTI LI AMERANNO

ORGASMI PIÙ LUNGHI ED INTENSI

- • Sviluppa un maggiore controllo e intensità dei tuoi orgasmi con queste palline vaginali. Usateli durante i preliminari o durante le vostre relazioni e tonificate il vostro pavimento pelvico.
- • NUOVO PESO PER LE TUE ROUTINE
- • Aggiungiamo due gomitolini da 60 g per rafforzare ancora di più i tuoi muscoli.
- • MAGGIORE NUMERO DI COMBINAZIONI PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ Con 6 palline tra cui



scegliere, che rappresentano il 44% di combinazioni in più per le tue routine.

- • SILICONE EXTRA MORBIDO
- • Con un connettore in silicone premium extra morbido e biocompatibile

LELO Beads™ Plus è un lussuoso set di 6 sfere ponderate che ti offre una maggiore varietà di combinazioni per tonificare il tuo pavimento pelvico. I pesi all'interno fanno vibrare dolcemente le palline quando ti muovi e ti aiutano a raggiungere un maggior numero di orgasmi progressivamente più intensi. (Misura classica: Ø 35 mm)

COME SONO UTILIZZATI:

- • Scegli il peso che ritieni più opportuno in base allo stato del tuo pavimento pelvico. Applica LELO Personal Moisturizer sulle sfere e sul tuo corpo, per una maggiore
- • conforto e piacere.
- • Posiziona ciascuna pallina nel connettore in silicone, assicurandoti di far passare il cordone
- • estrazione attraverso l'apertura.
- • Ora, con il cordone di estrazione esterno del connettore, inserite le palline
- • nella vagina, spingendoli delicatamente ma con fermezza.
- • La sfera più vicina all'ingresso della vagina dovrebbe essere di circa 2 cm.
- • Per rimuoverli rilassare i muscoli e tirare lentamente e delicatamente
- • Materiale: ABS/silicone biocompatibile/cordone in nylon Dimensioni connettore: 89 x 35 x 16 mm
- • Diametro delle sfere: 35 mm

Pesi: 2 x 28 g, 2 x 37 g, 2 x 60 g

Vantaggi

- • Esercita i muscoli pelvici indossandoli quando cammini, nuoti, anche quando sei seduto. Con la semplice contrazione e rilassamento dei tuoi muscoli vaginali, genererai una routine di allenamento semplice e coerente, con il minimo sforzo.
- • Con 2 sfere da 28 g, 2 da 37 g e 2 da 60 g per offrire una maggiore varietà di combinazioni e aiutarti a tonificare progressivamente.
- • Silicone premium extra morbido e biocompatibile per un comfort e una tranquillità totali.
- • Completamente sommergibili, sono incredibilmente facili da pulire

dracaryShop - Via del Castello 20, 04023 Formia (LT) - 04023 Formia - Latina - Italia

Tel: 351.7540029 - +39 342 33.75.436 (spedizioni) - amministrazione@buongiornoovino.com - www.buongiornoovino.com



LELO Beads™ Plus è costituito da un connettore in silicone e sei sfere ponderate. Singolarmente o combinati con il connettore in silicone, LELO Beads™ Plus ti offre un modo semplice, efficace e senza sforzo per ottimizzare l'allenamento del pavimento pelvico. Un'alternativa discreta e totalmente sicura per il corpo, con LELO Beads™ Plus tonificherai le pareti vaginali e i muscoli del pavimento pelvico con il minimo sforzo. Ora, con una maggiore varietà di combinazioni, tutto è a vantaggio del